



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Слуховой аппарат Ахон К-88

Принцип работы

Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией в этом руководстве, где вы найдете инструкции по вставке и извлечению ваших слуховых аппаратов, а также руководство по использованию вашего слухового аппарата. Правильное использование позволит получить максимальную пользу от устройства.

Слуховые аппараты получают сигналы через встроенные микрофоны, а затем преобразуют их в цифровые или электрические сигналы в зависимости от типа слухового аппарата. После чего сигналы, полученные устройством, усиливаются. Когда сигналы усиливаются, звуки, передаваемые пользователю, также усиливаются. Мощность усиления варьируется для различных степеней потери слуха и может быть предварительно настроена специалистом и отрегулирована пользователем.


Знакомство с устройством



1. Микрофон
2. Разъем зарядки
3. Амбушюр
4. Индикатор зарядки
5. Регулировка громкости
6. Вкл/Выкл

Сборка

1. Выберите силиконовую амбушюру подходящего размера.
2. Закрепите её на выступе слухового аппарата.

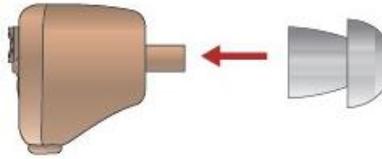


3. Поместите слуховой аппарат в ухо. Если он плохо держится, давит на ухо или вы слышите свист во время работы устройства, смените амбушюру на более подходящую по размеру.




Применение

1. Поверните переключатель Вкл/Выкл в положение «Выкл» и отрегулируйте громкость на минимальный уровень.

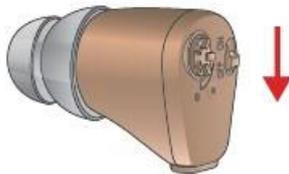

2. Настройте положение слухового аппарата таким образом, чтобы микрофон был направлен в сторону ладони. Удерживая слуховой аппарат большим и указательным пальцами, поместите кончик слухового аппарата в ушной канал и медленно поверните его, пока аппарат не зафиксируется плотно в ушном канале.

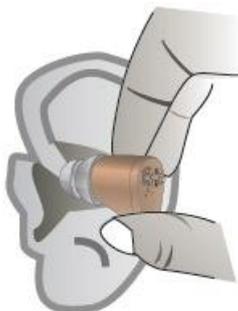


Примечание:


Слуховой аппарат должен быть выключен или уровень громкости должен быть на минимуме, иначе, при вставке амбушюра в ушной канал, вы можете услышать громкие звуки, которые могут вызвать дискомфорт.

Использование усилителя слуха


1. Переведите переключатель в положение Вкл.

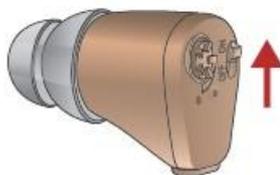

2. Отрегулируйте громкость.

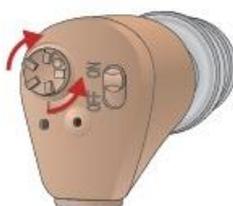

3. Перед тем как начать вынимать слуховой аппарат из уха, выключите его или уменьшите громкость до минимума.

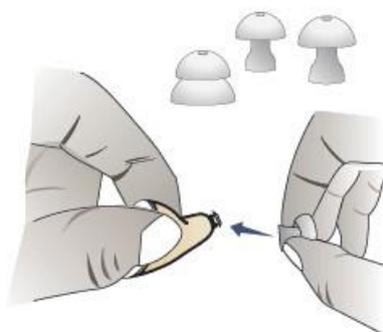

Примечание

Если вы слышите обратную связь при ношении слуховых аппаратов, пожалуйста, проверьте плотность прилегания вашего амбушюра. Если вы чувствуете, что не можете достаточно закрепить амбушюр, попробуйте заменить его на другой тип амбушюра.

Зарядка

1. Из-за низкого уровня заряда батареи, громкость слухового аппарата снижается или он не сможет нормально работать. Зарядите устройство перед продолжением ношения.
2. Пожалуйста, переведите переключатель питания Вкл/Выкл в положение «Выкл» перед зарядкой. Вставьте стандартный разъем USB-кабеля для зарядки в адаптер питания, а

другой конец в порт зарядки на слуховом аппарате. Подключите адаптер питания в розетку 220 В.

3. Во время зарядки индикатор слухового аппарата горит зеленым. Когда устройство полностью заряжено, индикатор гаснет.
4. Полная зарядка занимает 4,5–5 часов. Время использования до 40 часов (в идеальных условиях). В первый раз необходимо заряжать устройство в течение 6 часов до полной зарядки.

Меры предосторожности

1. Держите ваши слуховые аппараты чистыми и сухими. После использования протирайте корпус мягкой тканью или салфеткой, чтобы удалить жир, серу или влагу.
2. Никогда не погружайте слуховые аппараты в воду или другие жидкости, поскольку они могут нанести необратимые повреждения слуховым аппаратам.
3. Избегайте грубого обращения со слуховыми аппаратами или их падения на твердые поверхности или пол.
4. Не оставляйте слуховые аппараты под прямыми солнечными лучами или близко к источникам избыточного тепла, в запертой припаркованной на жаре машине. Избыточное тепло может повредить или деформировать корпус устройства.
5. Снимайте слуховые аппараты во время приема душа, плавания, сильного дождя или во влажной атмосфере, такой как хамам, баня или сауна.
6. Не бросайте батареи в огонь.
7. Не кладите батарейки в рот. Немедленно обратитесь к врачу, если батарейка была проглочена, так как они могут быть опасны для здоровья.
8. Держите батарейки вне зоны доступа домашних животных, детей и лиц с ограниченными возможностями.
9. Использованные батарейки вредны для окружающей среды. Пожалуйста, утилизируйте их согласно местным законам охраны природы.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!